



DEFIBTECH LIFELINE DEFIBRILLATOREN

Ob für den ungeübten Laienhelfer, den geübten Ersthelfer oder den Profiretter – Defibtech gibt Ihnen die passende Defibrillatorlösung an die Hand, die Ihnen bei Ihrer höchst verantwortungsvollen Aufgabe, maximale Unterstützung bietet.

Die Defibtech Lifeline Defibrillatoren – einzigartig einfach bedienbar, leistungsfähig und betriebssicher. Jetzt auch als Halb- oder Vollautomat, Sie haben die Wahl!



BEATMUNGSWAHL

Wahlweise kann je nach Situation und Anwender im Menü oder während des Betriebs die Ansage „Beatmung“ abgeschaltet werden



ZWEISPRACHIG

Während des Betriebs kann der Lifeline VIEW durch Drücken einer Taste die Sprache wechseln.



BILDFÜHRUNG WIRD ZUM STANDARD BEI DEFIBRILLATOREN

Sprach- und Bildführung durch den kompletten Wiederbelebungs-Algorithmus mit hochauflösendem LCD Farbbildschirm und Metronom – ein einzigartiges Plus an Sicherheit in der Anwendung.



ANALYSETECHNOLOGIE – SCHNELL UND EFFEKTIV

Erkennungswahrscheinlichkeit von 99% für schockbaren Rhythmus, Ladezeit unter 4 Sekunden (Schnellschockabgabe)



STATUS ÜBERTRAGUNG

Überwachung der Batterie und Elektroden auf Haltbarkeit mit Meldung bei Überschreitung. Der Lifeline VIEW sendet ein Radiosignal des aktuellen Status zur Fernüberwachung des Gerätes



QUALITÄT

8 Jahre Werksgarantie serienmäßig, neue PMA/FDA Zulassung bereits bestanden, sorgt für höchstes Vertrauen in die Zuverlässigkeit



Defib Deutschland GmbH
Kaiser-Friedrich-Ring 61
40547 Düsseldorf
+49 (0) 211-9753299-0
info@defibdeutschland.de



LEITFADEN
FÜR DEN HERZNOTFALL

1

BEWUSSTLOSE PERSON

1.1 Laut ansprechen und anfassen.




1.2 Atmung prüfen (sehen, hören, fühlen).



1.3 Notruf absetzen und Defibrillator holen lassen.

2

KOMPRESSIONEN

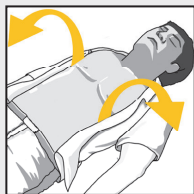

2.1 Oberkörper freimachen.

2.2 Sofort mit Kompressionen beginnen




5 - 6 CM
TIEF DRÜCKEN

100 - 120 x
PRO MIN.

3

BEATMEN

3.1 2x Beatmen 1 Sek. Luft in Mund oder Nase einblasen"
Kopf dabei überstrecken!
Danach ohne Pause weiter im Intervall 30 : 2 bis AED eintrifft!

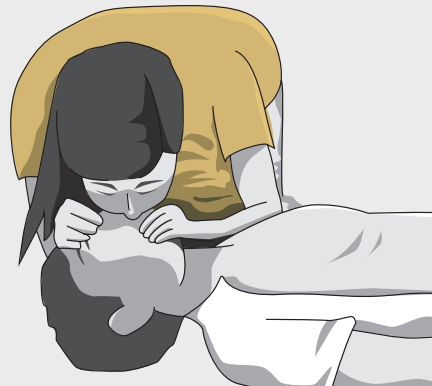

4

DEFIBRILLATOR TRIFFT EIN




5

SCHOCK ABGEBEN





4.1 Zum Einschalten grüne Taste drücken.

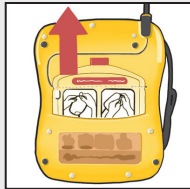

4.2 Elektroden aus rückseitigem Fach entnehmen.

4.3 Elektroden befestigen.

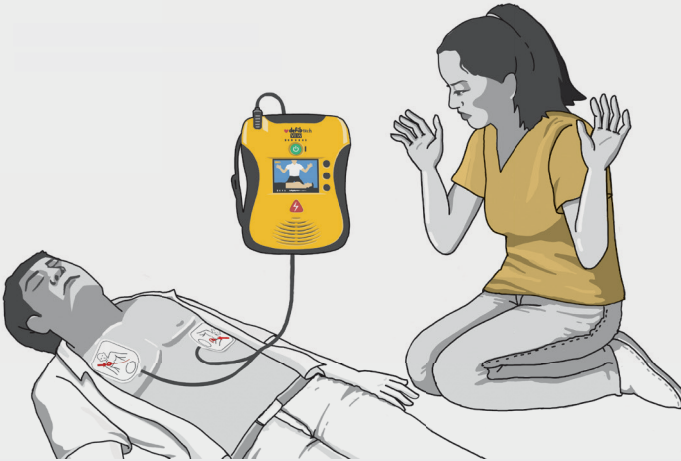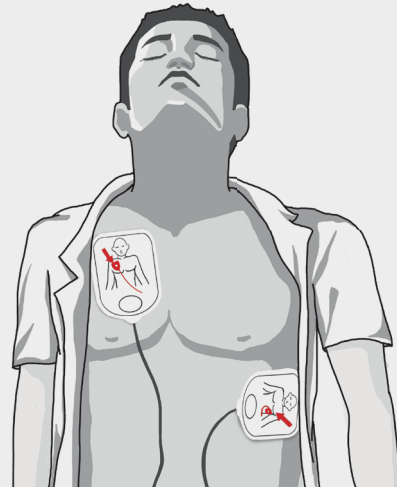

5.1 Kompression und Beatmung für 2 Minuten bis zur nächsten Analyse fortführen. Wie in Abb. 2 + 3 dargestellt.